

VP Planning Mobile 2.2.1



Le mode d'emploi de VP Planning Mobile 2.2.1 est fourni sous format électronique à la place du format papier. Ce manuel peut-être téléchargé dans différentes langues (français et anglais) au format PDF : [Télécharger le mode d'emploi](#)

Une copie papier du mode d'emploi peut être demandée à contact@visiblepatient.com sans coût supplémentaire et sera fournie sous 7 jours ouvrés.

Pour lire le mode d'emploi, vous devez utiliser le lecteur PDF installé sur votre appareil.

AVANT-PROPOS

INDICATION D'UTILISATION:

Visible Patient Planning est une application d'imagerie qui a pour but d'aider les professionnels de santé qualifiés à expliquer le diagnostic ou la planification du traitement à leurs patients.

Visible Patient Planning permet de télécharger et d'afficher les reconstructions 3D des patients et les rapports de modélisation associés depuis un serveur distant.

Son utilisation est restreinte à la communication avec les patients, à la démonstration, à la recherche ou à des fins éducatives. Toute autre utilisation est strictement interdite, en particulier l'utilisation clinique pour l'interprétation diagnostique ou la planification du traitement sur les êtres humains.

HOMOLOGATION

Visible Patient Planning n'est pas certifié en tant que dispositif médical commercial pour l'imagerie diagnostique et n'est pas certifié pour être utilisé en routine clinique et/ou pour les soins aux patients. Visible Patient Planning n'est ni approuvé par la FDA ni marqué CE.

Le logiciel est considéré comme étant un logiciel prototype et son utilisation est donc limitée à la communication avec les patients, à la démonstration, à la recherche ou à des fins éducatives.



Visible Patient SAS

RCS Strasbourg TI 794 458 125

1 place de l'hôpital

67000 Strasbourg, FRANCE

Capital social: 58.333 €

CONTACT

Mail: contact@visiblepatient.com

Tel.: +33 (0)3 90 22 42 09

Site web: www.visiblepatient.com

PRE-REQUIS :

VP Planning Mobile 2.2.1 nécessite un appareil Apple fonctionnant au minimum sous **iOS 10.3** et ayant un espace de stockage libre d'au moins **300 Mo**.


TELECHARGEMENT DE L'APPLICATION:

VP Planning Mobile peut être téléchargé via l'**App Store** à l'aide de la recherche : *Visible Patient Planning*.

Une fois l'application VP Planning trouvée :


1. Appuyez sur l'application.
2. Appuyer sur le bouton Obtenir, puis sur le bouton Installer.

L'application se télécharge alors sur votre appareil.

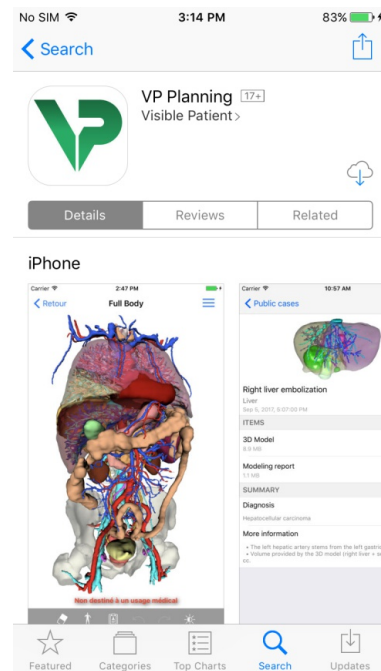

• Cheminement pour obtenir vos premiers cas

APPLICATION MOBILE
VISIBLE PATIENT : 5 étapes pour visualiser son modèle 3D

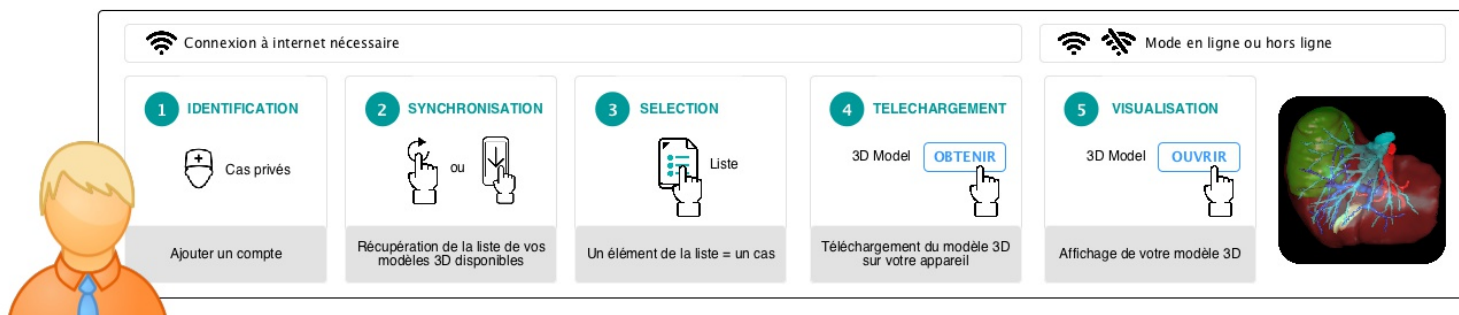

• Organisation de l'application

Cas privés



La section *Cas privés* vous permet de visualiser vos propres cas.

Cette fonctionnalité nécessite :

- d'avoir un **compte** sur le portail web Visible Patient,
- d'être **identifié** sur l'application (voir section IDENTIFICATION)
- d'être **client** du service en ligne [Visible Patient](#).

Une fois que votre modèle 3D est réalisé par Visible Patient, vous pouvez le télécharger (ainsi que son rapport de modélisation) et l'utiliser via cette section.

Dans cette section :

- Un patient est représenté par une tuile.
- Chaque tuile appartient à un **groupe** et est identifiée par un **numéro de commande** ainsi qu'un **numéro anonyme** unique.
- Vous pouvez accéder au modèle 3D de chaque patient en tapant sur sa tuile correspondante .

Cas publics



La section *Cas publics* de l'application vous permet de télécharger et visualiser des cas mis en avant par Visible Patient.

Tous ces cas sont composés d'un (ou plusieurs) modèle 3D et d'un pdf explicatif.

Cette section est idéale pour découvrir des cas atypiques ou parfaire sa compréhension anatomique.

Dans cette section :

- Les différents cas sont regroupés par thème.
- **Chaque tuile correspond à un grand thème** (abdomen, chirurgie du foie, zone cervical...).
- Les tuiles **Cas cliniques** quant à elles présentent un cas unique en détail.

PRINCIPALES FONCTIONNALITES

● Identification

Pour accéder à vos cas privés identifiez-vous dans la section **Configuration**. Vous pouvez également vous identifier en cliquant sur le lien **Ajouter un compte** disponible à partir de la section Cas privés.



- Pour vous identifier vous avez besoin de l'**adresse email** et du **mot de passe** que vous avez créé sur le **portail web Visible Patient**.

● Synchronisation

Pour obtenir la liste des cas disponibles vous devez synchroniser votre application.



Appuyez sur la touche de synchronisation en haut à gauche des pages **Cas publics** ou **Cas Privés**. Vous pouvez également **glisser puis relâcher** la vue vers le bas pour lancer la synchronisation.

Un texte indiquant la date et l'heure de la dernière synchronisation est affiché en haut de la page.

● Tri

Pour déterminer l'ordre d'affichage des modèles, appuyez sur la touche Tri disponible en haut à gauche des pages **Cas publics** ou **Cas privés**.



● Recherche

Pour effectuer une recherche dans la liste des modèles, appuyez sur la touche **Recherche** accessible en haut à gauche des pages **Cas publics** ou **Cas privés**.



● Téléchargement

Tapez sur une tuile pour afficher son contenu, puis tapez sur le(s) bouton(s) **OBTENIR** afin de télécharger les différents éléments disponibles.



Un fois obtenus, les éléments sont enregistrés sur votre dispositif et sont donc accessibles en mode hors ligne.

STATUTS DES CAS

Description des icônes affichées sur les différentes tuiles.

Statut



Ce cas est nouveau et disponible au téléchargement.

Il a été mis à jour ou ajouté lors de la dernière synchronisation. Aucune de ses données n'est présente sur votre téléphone, une connexion à internet est donc nécessaire pour le télécharger.



Ce cas est disponible au téléchargement.

Aucune de ses données n'est présente sur votre téléphone, une connexion à internet est donc nécessaire pour le télécharger.



Ce cas est téléchargé sur votre téléphone.

Ses données sont présentes sur votre téléphone et donc accessibles en mode hors-ligne.



Ce cas est partiellement téléchargé sur votre téléphone.

Ses données sont partiellement présentes sur votre téléphone, certains éléments (modèles 3D, pdf...) sont accessibles hors-ligne et d'autres nécessitent d'être téléchargés au préalable pour être visualisés.



Mise à jour du cas disponible au téléchargement.

Les données préalablement téléchargées de ce cas ne sont plus à jour. Il est nécessaire de cliquer sur le bouton **Mettre à jour** pour obtenir la dernière version des données de ce patient, puis de les re-télécharger.

NOTE : tant que vous ne faites pas la mise à jour, les données téléchargées précédemment sont toujours accessibles hors-ligne.



Ce cas n'est plus disponible au téléchargement ou présente des erreurs.

Prenez contact avec Visible Patient pour plus d'informations.

VUE 3D

Description des fonctionnalités de la vue 3D

Action



Glissez un de vos doigts **pour faire PIVOTER** le modèle 3D.



Eloignez deux de vos doigts **pour ZOOMER**.



Rapprochez deux de vos doigts **pour DEZOOMER**.



Déplacez deux de vos doigts **pour DEPLACER** le modèle 3D.

• OUTILS

Appuyez sur le bouton Outil (en bas à gauche de la vue 3D) pour ouvrir le menu des outils. Appuyez sur l'outil désiré pour le sélectionner.

Icône Action




L'outil **SELECTION** vous permet d'obtenir des informations sur une structure.

- *Simple appui* : nom et volume (en cc) de la structure.



L'outil **GOMME** vous permet de masquer/ changer la TRANSPARENCE des structures.

- *Simple appui* : masquer.
- *Double appui* : changer la transparence.

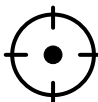

L'outil **FOCUS** vous permet de centrer la vue sur une zone ou une structure.

- *Simple appui* : focus sur une zone.
- *Double appui* : focus sur une structure.



VUE 3D

Description des fonctionnalités de la vue 3D

• ORGAN MANAGER

L'organ manager permet de changer la transparence et la visibilité des organes.

Appuyez sur le bouton Organ manager (en bas de la vue 3D) pour ouvrir la fenêtre Organ manager. Puis, appuyez sur la ligne de l'organe cible pour changer sa transparence.




L'organe est complètement masqué



L'organe est visible en transparence



L'organe est visible et opaque

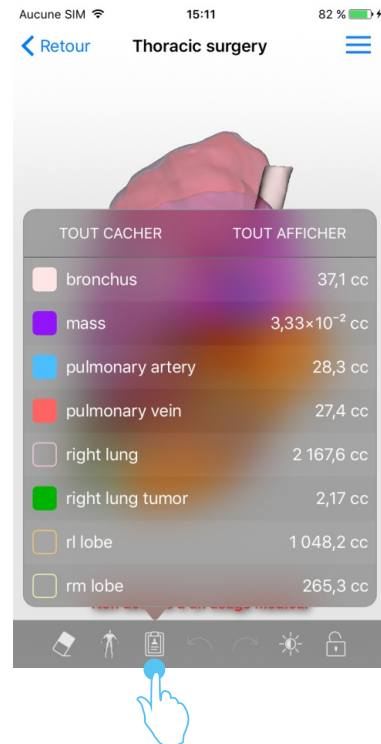


• ORIENTATION DE LA VUE

La fenêtre orientation vous permet de changer l'orientation de la vue 3D.

Appuyez sur le bouton Orientation (en bas de la vue 3D) pour ouvrir la fenêtre Orientation. Vous pouvez ensuite choisir la vue axiale, sagittale ou frontale.



Cette icône vous indique l'orientation de votre modèle

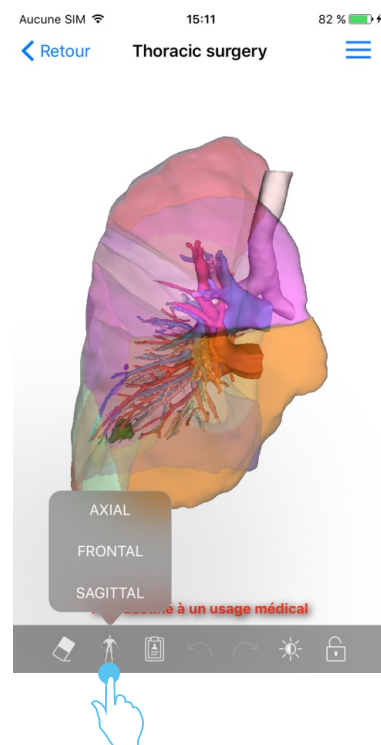

VUE 3D

Description des fonctionnalités de la vue 3D

• ANNULER/RETABLIR


Appuyer sur les boutons Annuler/Rétablir (en bas de la vue 3D) pour annuler ou rétablir les dernières actions.



• MENU

Affiche le Tutoriel et le bouton de capture d'écran.

Appuyez sur le bouton Menu (dans le coin en haut à droite de la vue 3D) pour ouvrir le menu. Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton Tutoriel pour afficher le tutoriel de la vue 3D ou sur le bouton capture pour réaliser une capture d'écran.

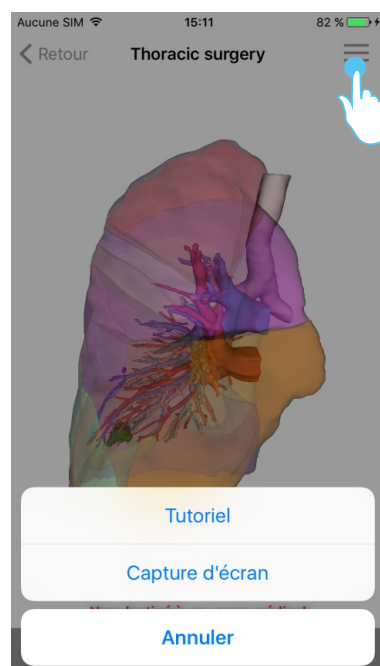

AUTRES INFORMATIONS UTILES

- Vous êtes automatiquement délogué toutes les 20 minutes. Votre mot de passe vous sera alors redemandé afin de pouvoir synchroniser l'application. Ce mécanisme est mis en place afin d'assurer la sécurité des données patient disponibles via l'application.
- Si vous désirez supprimer votre compte de l'application, affichez la vue de gestion des comptes et glissez le compte souhaité vers la gauche afin de le supprimer. Cette action supprimera l'ensemble des données (modèles 3D, pdf...) préalablement téléchargées sur votre portable.

CONTACT

POUR TOUT RESEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE OU ASSISTANCE
VOUS POUVEZ CONTACTER **VISIBLE PATIENT** AUX COORDONNEES SUIVANTES :

mail : contact@visiblepatient.com

Tel. : +33.3.90.22.42.09

VP Planning Mobile 2.2.1

Version 1, Août 2018

